



¡Se sorprenderá!



pyon 2

Verlo claro con LED.

Un Piezo Scaler con 5 LEDs.

Pyon 2: el Piezo-Scaler con cinco diodos de emisión de luz esterilizables en una pieza de mano. Esto significa trabajar con calidad de luz natural y un campo de visión sensiblemente mayor que el que proporcionan las

fuentes de luz tradicionales. Esto significa también la reproducción exacta del correspondiente color del diente y una visión de contraste mejorada. Todo ello se traduce en un trabajo de mayor precisión.



¡LED esterilizable!

Limpieza allá donde mire: la pieza de mano con anillo LED incluido es esterilizable. Adicionalmente, el Pyon 2 se suministra con un filtro de refrigerante que se ocupa de proporcionar agua limpia. La función especial de lavado del aparato evacua de forma rápida y segura el agua que pueda quedar estancada.

Control de seguridad

En caso de que la punta no haya sido insertada de forma correcta y fija, el aparato interrumpe automáticamente el funcionamiento.

Pieza de mano

La pieza de mano Pyon 2 convence por su ligero peso, su diseño ergonómico y su anillo LED de 5 diodos. Con ella tendrá todas las situaciones controladas; sin cansancio y con una mirada clara sobre lo esencial.

¡Para 4 campos de aplicación!

Pyon 2: el Piezo-Scaler con LED para la tartrectomía, parodontología y micropreparaciones. Con el nuevo Piezo-Scaler de W&H puede estar seguro de obtener los mejores resultados en todas las aplicaciones. Porque su anillo LED en la pieza de mano permite un trabajo mucho más minucioso y preciso. Esto no sólo es útil durante la prepa-

ración fina de fisuras, sino también a la hora de eliminar el milímetro decisivo de concreciones subgingivales. Para ello es absolutamente necesario un surtido de puntas perfectamente adaptado para la aplicación correspondiente, todo ello viene incluido en el Pyon 2, al igual que los dos años de garantía.



5 LEDs

Los diodos luminosos (LED) se basan en conexiones de semiconductores que transforman la corriente directamente en luz. El resultado son fuentes de luz robustas, esterilizables, que apenas se calientan, que resisten los choques y que no emiten ningún tipo de rayos ultravioleta e infrarrojos dañinos. Así mismo, los LEDs presentan una vida útil sensiblemente más prolongada que las fuentes de luz tradicionales, lo que ayuda a controlar los costes.

4 campos de aplicación

Gracias a la facilidad de manejo de su regulador, es posible adaptar la fuerza del Pyon 2 sin esfuerzo al campo de aplicación o, en su caso, a la punta correspondiente. Independientemente de que sea en una endodancia, en la profilaxis, en la periodontología o en el tratamiento de caries.

Tecnología punta perfeccionada.

Con ayuda del surtido de puntas de W&H para el Pyon 2, dispondrá de una selección de puntas de primera clase. Además de las puntas universales para el campo de la

profilaxis, el surtido incluye también una punta ImplantClean de nuevo desarrollo para limpiar implantes y una punta de restauración con la que se pueden



1U

Con la nueva punta universal 1U se puede eliminar el sarro supragingival en todos los cuadrantes. De esta manera se consigue realizar el tratamiento completo sin el molesto cambio de puntas.



2U

La punta 2U visiblemente más larga y más estrecha es especialmente idónea para el tratamiento de pacientes Recall y el repaso fino. Permite el raspado fino del sarro supragingival y la eliminación de la placa.



3U

La punta universal 3U se ha desarrollado también para raspados finos en la región supragingival. Adicionalmente, la punta está ligeramente redondeada y es especialmente estrecha y corta, lo que la convierte en un instrumento de limpieza ideal para los espacios interdentes.

Cambiador de puntas

Con el cambiador de puntas de W&H pueden insertarse y extraerse puntas sin problemas.

Al colocarla, el par de giro se habrá alcanzado cuando se oiga con claridad un clic.

Simultáneamente, el cambiador de puntas constituye un lugar ideal para guardar la punta a la hora de esterilizarla.



Para obtener los mejores resultados en cualquier campo.

eliminar pequeñas caries. El control de seguridad integrado en la pieza de mano proporciona una seguridad absoluta

durante la aplicación: si la punta está mal colocada o no está correctamente fijada, el aparato se detendrá.



4U

Para la eliminación de grandes superficies de sarro.



1P

Se ha desarrollado para la eliminación de los depósitos que se hayan formado en la región subgingival. La nueva punta 1P se amortiza rápidamente durante el tratamiento de profundas bolsas periodontales.




1R

La punta de restauración con cono de diamante para la ampliación de la entrada del canal radicular y para la preparación fina de fisuras.

Ficha de puntas

Para prevenir los efectos del paso del tiempo, en el suministro se incluye una ficha para todas las puntas universales y la punta Perio, con la cual es posible medir el desgaste de cada una de las puntas. El desgaste no debe ser superior a 2 mm.

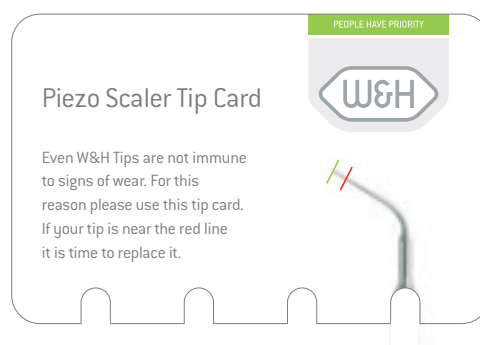

Una pieza de mano, dos posibilidades. Con y sin luz.



La pieza de mano Pyon 2 sin luz: desmontable, esterilizable, de fácil limpieza y con modo de seguridad: en caso de que la punta no esté correctamente fijada, la pieza de mano se detiene automáticamente.

La pieza de mano Pyon 2 con LED: el anillo múltiple LED puede desmontarse y esterilizarse por separado. La totalidad de la pieza de mano también puede desmontarse y esterilizarse. Y también en este caso es válido el modo de seguridad: en caso de que la correspondiente punta no esté correctamente fijada, la pieza de mano se detiene automáticamente.

En el contenido suministrado se incluyen ambas posibilidades, ya que, además de la pieza de mano Pyon 2 con LED, también se incluye la fina tapa de la pieza de mano para el funcionamiento sin luz.

Pyon 2 – el Piezo Scaler con LED.



Datos técnicos



Medidas de la unidad (a x l x a):	164 x 170 x 77 mm
Peso de la unidad:	460 g
Frecuencia:	27 – 32 KHz
Manguera para refrigerante:	2 m
Manguera pieza de mano con acoplamiento:	1,8 m
Peso de la pieza de mano:	52,5 g
Cant. máx. líquido refrigerante:	aprox. 50 ml/min



W&H Ibérica
C/ Ciudad de Melilla, 3 Baja
46017 Valencia, España

t +34 (0) 96 353 2020
f +34 (0) 96 353 2579
oficinas.es@wh.com, wh.com