

---

**SISTEMA DE  
BLANQUEAMIENTO DENTAL  
MANUAL DE USUARIO**

**pro  
mo  
sa  
dental**

---

**Dr. Miguel Vera #147  
Col. Los Doctores  
Monterrey, N.L. 64710  
Tels: (81) 8478-8978 y 79  
Email: [info@promosadental.com](mailto:info@promosadental.com)**









## **ÍNDICE**

- Cuidados .....	2
- Características del producto .....	3
- Especificación del producto .....	3
- Contenido .....	4
- Operación .....	4
- Garantía .....	5
- Responsabilidad .....	7

## \* CUIDADOS

### Atención:

-  Antes de poner en marcha e instalar el producto, lea detenidamente el instructivo. Como con cualquier dispositivo, el buen funcionamiento y operación segura, depende del cumplimiento de las recomendaciones dadas en el presente manual.
-  Es importante que atienda las siguientes recomendaciones y procedimientos: No aplicar la luz directamente en el área gingival sin protección.
-  Las personas con antecedentes de fotosensibilidad ó quienes están usando medicamentos fotosensibilizantes, no deben estar expuestos a la luz del equipo.
-  No es adecuado el uso del equipo en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire y óxido nítrico.
-  Por favor, no mire directo a la luz cuando la máquina esté en uso ó podría lastimar su vista. Asegúrese de utilizar gafas protectoras.
-  No exceda de 90° la curva cuando el brazo del equipo está en uso, ya que el codo puede romperse fácilmente y tal vez ocasionar un ruido posteriormente.

## \* SONIDOS DE AVISO

### Atención:

- a) Sonará un "beep" por cada click.
- b) Sonará un "beep" cuando quede un minuto.
- c) Sonará un "beep" 3 segundos después de haber terminado.

### Responsabilidad:

Es su responsabilidad el efecto en la seguridad y rendimiento del producto.

- La instalación eléctrica en el consultorio debe ajustarse a los requerimientos del equipo.
- El equipo debe ser usado de acuerdo con las instrucciones de uso.


**\* CONTENIDO**

Lámpara	1 Pieza
Adaptador Unidad	1 Pieza
Gafas Protectoras	1 Pieza
Protectores Boquilla	1 Pieza
Retractor	1 Pieza
Control Remoto	1 Pieza
Manual Usuario	1 Pieza

**\* OPERACIÓN**

Encendido de la lámpara:

Conecte el eliminador al orificio trasero de la base de la lámpara.

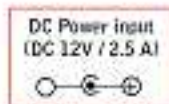

Operación de la lámpara:

- a) Botón de encendido: Presione inicio/ stop para encender ó apagar.
- b) Botón pausa: Presione el botón de pausa cuando desee detener temporalmente el proceso de blanqueamiento.
- c) Botón de ajuste de minuto: Presione las flechas arriba/ abajo para agregar ó disminuir el tiempo de trabajo.



Facilitate the placement of teeth whitening gel

**\* MANUAL DE CONTROL REMOTO**



Nota:

El control remoto responde a una distancia de 5 metros máximo y con un ángulo de 45° grados.

**\* CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Mango ergonómico diseñado para un mejor ajuste.
- Combinación de tres LED'S de luz azul de alta eficiencia.
- Contador de tiempo que permite ajustar y controlar el tiempo de blanqueamiento.
- Indicador digital con alarma sonora.
- Sistema de Blanqueamiento de Alta Velocidad.
- Pequeña base diseñada para su uso en cualquier escritorio.
- Emisión de luz uniforme.
- Alta sensibilidad de control a distancia.

**\* ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

- Espectro: 420nm- 500nm
- Potencia de luz: 2000 mW/ cm<sup>2</sup>
- 100/ 240 Volts, 50/ 60 Hz
- Peso: 1.51 kg
- Radio máximo de trabajo: 50 cm.